

L'APPAREIL À IONOPHORÈSE – MODE D'EMPLOI

- 1/ Appliquer du **gel** ionisable sur le **visage** de la **cliente**.
- 2/ Vérifier que : a) le **potentiomètre** est à 0.
b) l'**interrupteur** est sur "ARRET".
- 3/ Brancher l'appareil.
- 4/ Fixer l'**électrode** sur le **porte-électrode**.
- 5/ Désinfecter les deux **électrodes**.
- 6/ Mettre l'**interrupteur** sur "MARCHE".
- 7/ Donner l'**électrode** indifférente (ou passive) à la **cliente**.
- 8/ Passer l'**électrode** active sur le **visage** en respectant l'**anatomie** de la **cliente**.
- 9/ Régler l'**intensité** en **fonction** de la **sensibilité** de la **cliente**.
- 10/ En **fin** de **soin**, diminuer l'**intensité** jusqu'à 0.
- 11/ Positionner l'**interrupteur** sur "ARRET".
- 12/ Débrancher puis retirer l'**électrode**.
- 13/ Nettoyer et désinfecter les **électrodes** et l'appareil.
- 14/ Ranger soigneusement l'appareil.

L'APPAREIL À IONOPHORÈSE – MODE D'EMPLOI

EXERCICE 1 : L'APPAREIL A IONOPHORÈSE



Lire les questions, regarder la vidéo et répondre aux questions :

1/ Quel est le sujet de cette vidéo ?

.....

2/ Donner le nom de Citer trois éléments composant cet appareil.

EXERCICE 2 : QUELQUES VERBES D'ACTION



Rechercher le sens de chaque verbe et compléter le tableau avec les mots suivants :

contrôler, enlever, laver, mettre, réduire, remettre, replacer, tuer les microbes

VERBES DU TEXTE	SYNONYMES
1/ <i>appliquer</i>	
2/ <i>nettoyer</i>	
3/ <i>désinfecter</i>	
4/ <i>vérifier</i>	
5/ <i>donner</i>	
6/ <i>retirer</i>	
7/ <i>diminuer</i>	
8/ <i>ranger</i>	

EXERCICE 3 : LA SEGMENTATION DES MOTS DE LA PHRASE

Réécrire ces phrases en séparant correctement les mots.

1/ Appliquer du gel ionisable sur le visage.

2/ Vérifier que : a) le potentiomètre est à 0 b) l'interrupteur soit sur "ARRET".

3/ Brancher l'appareil.

.....
.....
.....

EXERCICE 4 : VOCABULAIRE DES CONSIGNES



1/ Relier chaque mot à son contraire :

- a) **arrêt** b) **débrancher** c) **marche** d) **brancher**

2/ Indiquer la fonction de chaque **électrode** :

ELECTRODES	DEFINITIONS
indifférente ou passive	a) qui permet d'amener le courant sur la peau
active	b) qui permet de fermer le courant

3/ Expliquer l'expression suivante : "**en respectant l'anatomie de la cliente**"

.....

.....

.....

4/ **Indiquer ce** que vous dites à la cliente lorsque vous **réglez l'intensité en fonction de sa sensibilité** ?

.....

.....

.....

5/ Relier



mettre l'interrupteur sur « marche »

Eteindre

positionner l'interrupteur sur « arrêt »

Allumer

6/ **Indiquer l'action à effectuer pour régler l'intensité du courant, comme dans l'exemple proposé**

<p>fixer :</p> <p>brancher cette partie de l'électrode dans la prise de l'appareil.</p> 	 <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

Les consignes du mode d'emploi ont été mélangées. Découper et reconstituer l'ordre chronologique de ces actions. Vous pouvez vous aider des exercices effectués.

L'APPAREIL À IONOPHORÈSE – MODE D'EMPLOI

✂.....

Appliquer du gel ionisable sur le visage de la cliente.

✂.....

Vérifier que : a) le potentiomètre est à 0.
b) l'interrupteur est sur "ARRET".

✂.....

Brancher l'appareil.

✂.....

Fixer l'électrode sur le porte-électrode.

✂.....

Désinfecter les deux électrodes.

✂.....

Mettre l'interrupteur sur "MARCHE".

✂.....

Donner l'électrode indifférente (ou passive) à la cliente.

✂.....

Passer l'électrode active sur le visage en respectant l'anatomie de la cliente.

✂.....

Régler l'intensité en fonction de la sensibilité de la cliente.

✂.....

En fin de soin, diminuer l'intensité jusqu'à 0.

✂.....

Positionner l'interrupteur sur "ARRET".

✂.....

Débrancher puis retirer l'électrode.

✂.....

Nettoyer et désinfecter les électrodes et l'appareil.

✂.....

Ranger soigneusement l'appareil.